

SCHEMA TECNICA

ArtiSential Applicatore di Clip M/L con anelli di controllo regolabili




Destinazione d'uso:

Strumento laparoscopico/endoscopico monouso utilizzato durante interventi chirurgici laparoscopici per applicare Clip monouso misura M/L per legare tessuti molli e vasi sanguigni.


Le procedure indicate sono:
procedure chirurgiche addominali, ginecologiche, urologiche, toraciche, plastiche e ricostruttive, otorino, pediatriche, cardiocirurgiche etc.)

Codice	Descrizione	Repertorio DM	CND
ACA01-LV	ArtiSential Applicatore di Clip M/L ADJ Lock 38cm	2555937	K01020199
ACA01-FV	ArtiSential Applicatore di Clip M/L ADJ no-Lock 38cm	2555924	
ACA01S-LV	ArtiSential Applicatore di Clip M/L ADJ Lock 25cm	2555938	
ACA01S-FV	ArtiSential Applicatore di Clip M/L ADJ no-Lock 25cm	2555895	
5ACA01-LV	ArtiSential5 Applicatore di Clip M/L ADJ Lock 38cm	2557325	
5ACA01-FV	ArtiSential5 Applicatore di Clip M/L ADJ no-Lock 38cm	2557320	
5ACA01S-LV	ArtiSential5 Applicatore di Clip M/L ADJ Lock 30cm	2557333	
5ACA01S-FV	ArtiSential5 Applicatore di Clip M/L ADJ no-Lock 30cm	2557329	


Descrizione del sistema:

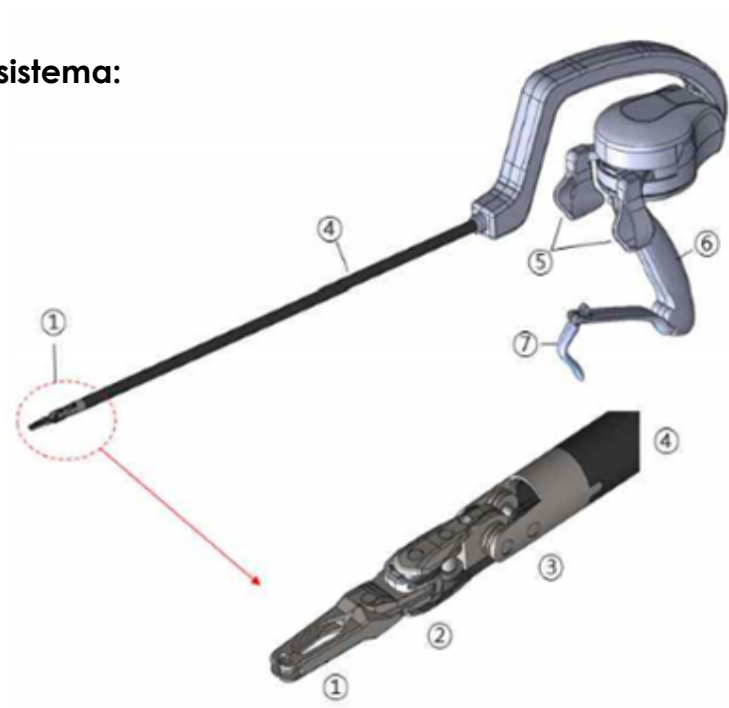


Misure:

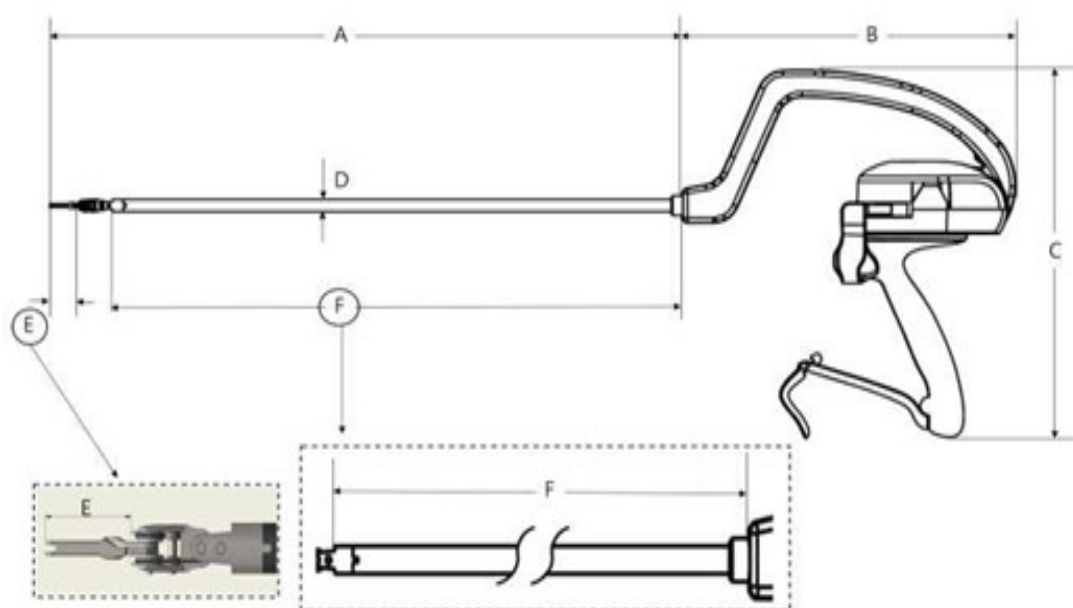







No.	Descrizione/ Funzione	Spiegazione
1	Morso	La parte che tiene e chiude un vaso o un tessuto che necessita di legatura mediante una Clip montata
2	Snodo distale morso	La connessione snodata del morso, che sostiene le branche della pinza e permette la regolazione e movimentazione delle stesse da un lato all'altro.
3	Snodo prossimale morso	La connessione snodata del morso che permette allo stesso di muoversi contemporaneamente allo snodo distale per articolare in basso e in alto le branche porta-clip.
4	Stelo	Stelo di connessione tra gli snodi del morso e l'impugnatura
5	Anelli di controllo	La sede è posta nell'impugnatura, l'operatore inserendovi le dita è in grado di controllare i movimenti di presa del morso, quindi apertura e chiusura dello stesso, inoltre mediante le strisce in velcro regolabili, tale controllo diviene maggiormente preciso grazie ad una maggiore aderenza delle dita agli anelli stessi.
6	Impugnatura	Combina la rotazione e la direzione del morso per ottenerne il controllo
7	Leva di blocco*	Fissa la posizione di presa e articolazione. *solo per i modelli dotati di leva di blocco.

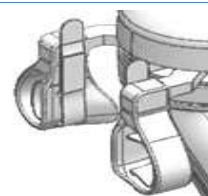

Codice	Specifiche	D Diametro mm	E Morso mm	F Stelo mm
ACA01-LV	Applicatore di Clip M/L Lock ADJ	Ø8	19	380
ACA01S-LV				250
ACA01-FV	Applicatore di Clip M/L ADJ No-Lock			380
ACA01S-FV				250
5ACA01-LV	Applicatore di Clip M/L Lock ADJ	Ø5	17	376.5
5ACA01S-LV				296.5
5ACA01-FV	Applicatore di Clip M/L ADJ No-Lock			376.5
5ACA01S-FV				296.5

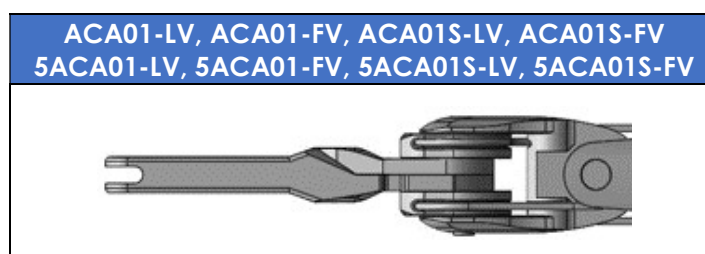Morso:**Prestazioni e Movimenti:**

Prestazioni	
Angolo di articolazione morso alto/basso	Angolo di articolazione morso destra/sinistra
±80° o più	±80° o più

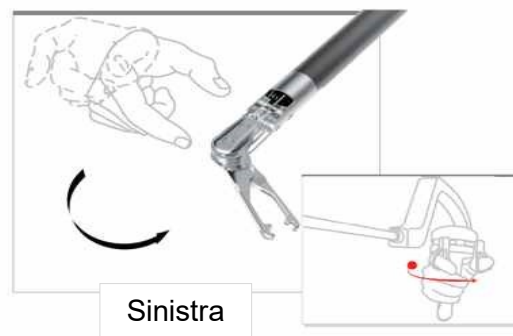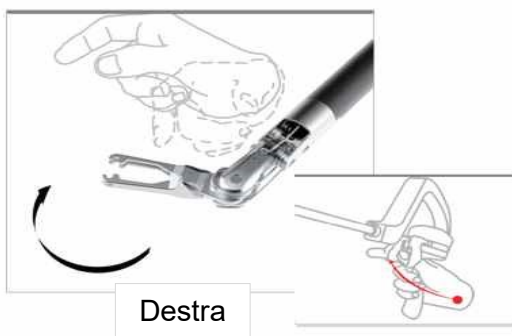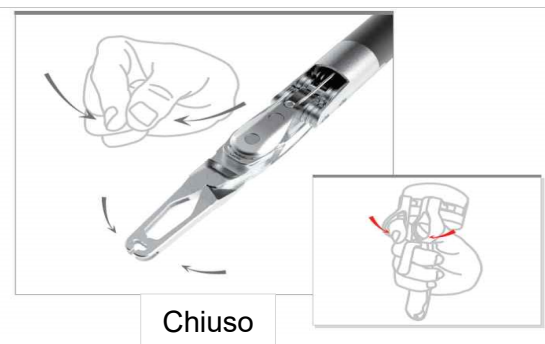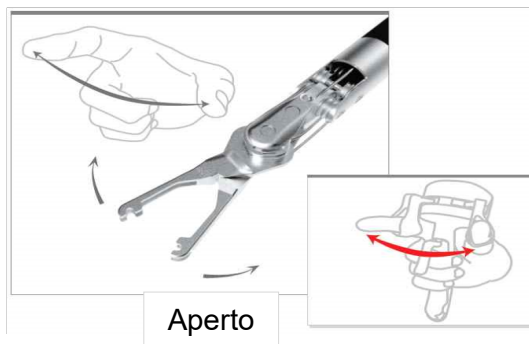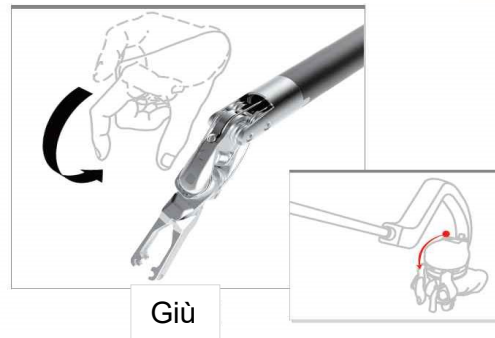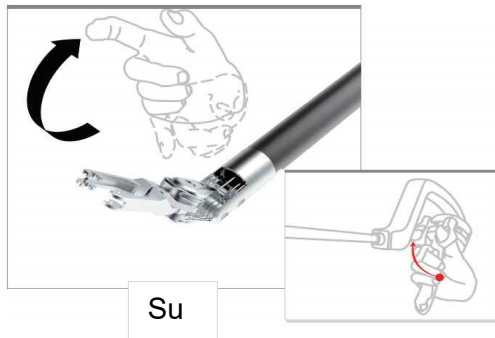

Materiali di composizione:	Ceramica/Vetro, Acciaio inox.
Stoccaggio:	Dopo il confezionamento, i prodotti devono essere conservati nelle seguenti condizioni, evitare i gas corrosivi e conservarli in un luogo ben ventilato. Umidità relativa: meno dell'80%, Temperatura: 1°C~50°C
Sterilizzazione:	EO Ossido di Etilene
Durata della Sterilizzazione:	36 mesi
Marchio CE:	Nr. 024-MDR/QS-008 – Notify Body: 3EC International A.S. - 2265
Compatibilità:	Il prodotto è conforme alle normative vigenti in materia di compatibilità, tossicità e tollerabilità con tessuti e liquidi biologici, ed è privo di lattice e ftalati.
Classe di Appartenenza:	Classe IIa – Reg. UE 2017/745
Istruzioni, avvertenze, controindicazioni ecc.:	Si rimanda alle istruzioni d'uso allegate
Confezione:	Singola-monouso, Box da 1 pz
Confezionamento:	Esterno: cartone Interno: TNT – polietilene
Produttore:	LivsMed Inc. 304, D-dong, 700, Pangyo-ro, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Repubblica di Corea (Yatap-dong Bundang TechnoPark) Tel: +82 70-4282-7652 Fax: +82 31-706-3211 Sito web: www.livsmmed.co.kr e-mail: livsmmed.info@gmail.com
Distributore Italia:	Joint Medical Srl Via Filippo Turati, 74 00015 - Monterotondo (RM) Tel. 06 39366066 Fax 06 25496205 info@jointmedical.it www.jointmedical.it