

SCHEMA TECNICA

ArtiSential Uncino e Spatola HC– Monopolare

**Destinazione d'uso:**

L'Uncino e la Spatola Mopolari HC ArtiSential sono strumenti monouso, invasivi che vengono utilizzati anche con un generatore elettrochirurgico. Sono destinati ad essere utilizzati durante le procedure chirurgiche laparoscopiche, toracoscopiche ed endoscopiche per incisione/coagulazione per elettro-cauterizzare.

Le procedure indicate sono:

procedure chirurgiche addominali, ginecologiche, urologiche, toraciche, plastiche e ricostruttive, otorino, pediatriche, cardiocirurgiche etc..


UNCINI 5mm/8mm HC(Hand Control):

Codice	Descrizione						Repertorio DM	CND
AMHD01-LH	ArtiSential	Uncino Mon HC	DOWN	Lock	38cm		2636392	K01020199
AMHD01-FH	ArtiSential	Uncino Mon HC	DOWN	No-Lock	38cm		2636403	
AMHD01S-LH	ArtiSential	Uncino Mon HC	DOWN	Lock	25cm		2636397	
AMHD01S-FH	ArtiSential	Uncino Mon HC	DOWN	No-Lock	25cm		2636429	
AMHU01-LH	ArtiSential	Uncino Mon HC	UP	Lock	38cm		2636394	
AMHU01-FH	ArtiSential	Uncino Mon HC	UP	No-Lock	38cm		2636404	
AMHU01S-LH	ArtiSential	Uncino Mon HC	UP	Lock	25cm		2636399	
AMHU01S-FH	ArtiSential	Uncino Mon HC	UP	No-Lock	25cm		2636431	
AMHL01-LH	ArtiSential	Uncino Mon HC	LEFT	Lock	38cm		2636395	
AMHL01-FH	ArtiSential	Uncino Mon HC	LEFT	No-Lock	38cm		2636405	
AMHL01S-LH	ArtiSential	Uncino Mon HC	LEFT	Lock	25cm		2636401	
AMHL01S-FH	ArtiSential	Uncino Mon HC	LEFT	No-Lock	25cm		2636432	
AMHR01-LH	ArtiSential	Uncino Mon HC	RIGHT	Lock	38cm		2636396	
AMHR01-FH	ArtiSential	Uncino Mon HC	RIGHT	No-Lock	38cm		2636428	
AMHR01S-LH	ArtiSential	Uncino Mon HC	RIGHT	Lock	25cm		2636402	
AMHR01S-FH	ArtiSential	Uncino Mon HC	RIGHT	No-Lock	25cm		2636433	
5AMHD01-LH	ArtiSential	Uncino Mon HC	DOWN	Lock	5mm/38cm		2636466	
5AMHD01-FH	ArtiSential	Uncino Mon HC	DOWN	No-Lock	5mm/38cm		2636485	
5AMHD01S-LH	ArtiSential	Uncino Mon HC	DOWN	Lock	5mm/30cm		2636474	
5AMHD01S-FH	ArtiSential	Uncino Mon HC	DOWN	No-Lock	5mm/30cm		2636496	
5AMHU01-LH	ArtiSential	Uncino Mon HC	UP	Lock	5mm/38cm		2636468	
5AMHU01-FH	ArtiSential	Uncino Mon HC	UP	No-Lock	5mm/38cm		2636488	
5AMHU01S-LH	ArtiSential	Uncino Mon HC	UP	Lock	5mm/30cm		2636478	
5AMHU01S-FH	ArtiSential	Uncino Mon HC	UP	No-Lock	5mm/30cm		2636504	
5AMHL01-LH	ArtiSential	Uncino Mon HC	LEFT	Lock	5mm/38cm		2636470	
5AMHL01-FH	ArtiSential	Uncino Mon HC	LEFT	No-Lock	5mm/38cm		2636490	
5AMHL01S-LH	ArtiSential	Uncino Mon HC	LEFT	Lock	5mm/30cm		2636480	
5AMHL01S-FH	ArtiSential	Uncino Mon HC	LEFT	No-Lock	5mm/30cm		2636508	
5AMHR01-LH	ArtiSential	Uncino Mon HC	RIGHT	Lock	5mm/38cm		2636472	
5AMHR01-FH	ArtiSential	Uncino Mon HC	RIGHT	No-Lock	5mm/38cm		2636494	
5AMHR01S-LH	ArtiSential	Uncino Mon HC	RIGHT	Lock	5mm/30cm		2636482	
5AMHR01S-FH	ArtiSential	Uncino Mon HC	RIGHT	No-Lock	5mm/30cm		2636511	

SPATOLE 5mm/8mm HC(Hand Control):


Codice	Descrizione					Repertorio DM	CND
AMT01-LH	ArtiSential	Spatola Monopolare HC	Lock	38cm		2636434	K01020199
AMT01-FH	ArtiSential	Spatola Monopolare HC	No-Lock	38cm		2636436	
AMT01S-LH	ArtiSential	Spatola Monopolare HC	Lock	25cm		2636435	
AMT01S-FH	ArtiSential	Spatola Monopolare HC	No-Lock	25cm		2636439	
5AMT01-LH	ArtiSential	Spatola Monopolare HC	Lock	5mm/38cm		2636513	
5AMT01-FH	ArtiSential	Spatola Monopolare HC	No-Lock	5mm/38cm		2636517	
5AMT01S-LH	ArtiSential	Spatola Monopolare HC	Lock	5mm/30cm		2636515	
5AMT01S-FH	ArtiSential	Spatola Monopolare HC	No-Lock	5mm/30cm		2636520	

Descrizione del sistema:

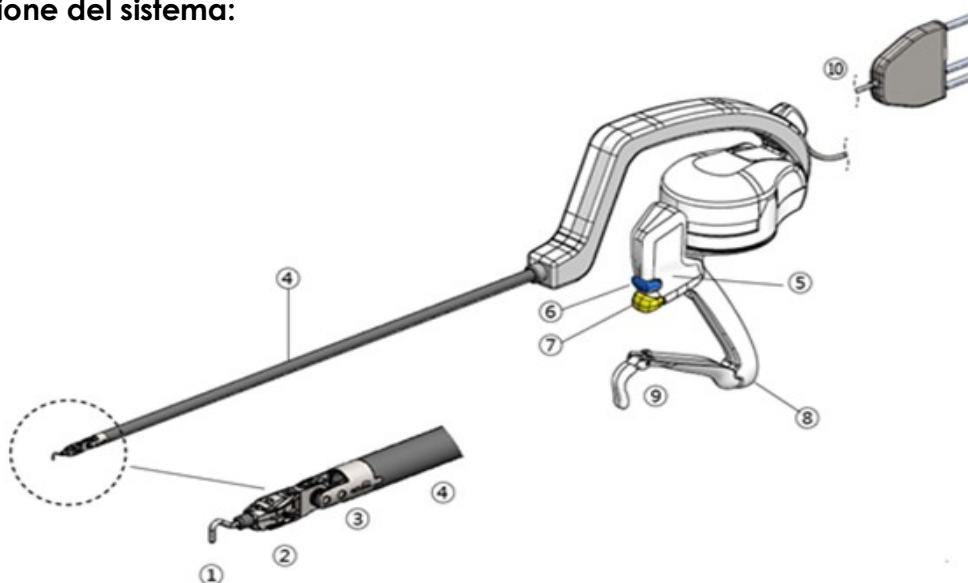

No.	Descrizione/ Funzione	Spiegazione
1	Punta Terminale	Uncino o Spatola, costituiscono l'elettrodo monopolare per effettuare dissezione, emostasi, taglio e coagulazione,
2	Snodo distale morso	La connessione snodata del terminale, che sostiene l'Uncino o la Spatola e permette la movimentazione dello stesso da un lato all'altro.
3	Snodo prossimale morso	La connessione snodata del terminale che permette allo stesso di muoversi anche contemporaneamente allo snodo distale, in particolare per articolare in basso e in alto la punta-terminale stessa.
4	Stelo	Stelo di connessione tra gli snodi della punta-terminale e l'impugnatura
5	Direzionatore	La sede posta nell'impugnatura dove l'operatore è in grado di controllare i movimenti di direzione e snodo dx/sx della punta-terminale.
6	Pulsante COAG	Pulsante di attivazione erogazione modalità COAGULAZIONE
7	Pulsante CUT	Pulsante di attivazione erogazione modalità TAGLIO
8	Impugnatura	Spostando l'impugnatura verso l'alto, verso il basso, verso sinistra e destra, muove la punta-terminale verso l'alto, verso il basso, a sinistra e a destra di un intervallo di +/-80 gradi, e anche quando si ruota l'impugnatura, il terminale può articolare di 360 gradi.
9	Leva di blocco	Quando azionata(aperta) fissa la posizione dello strumento e ne inibisce l'articolazione. (Solo per i modelli con leva di blocco)
10	Spina/Connettore	Spina/Connettore del cavo per un'unità elettrochirurgica

Misure:

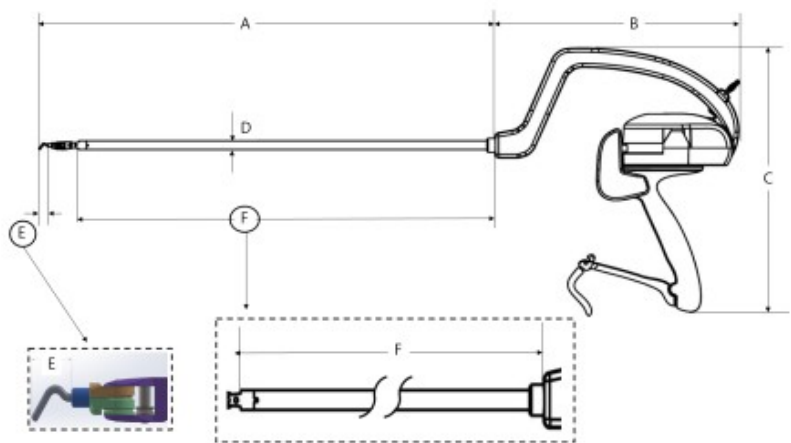

Uncino Down



Uncino Up



Uncino Sx



Uncino Dx




Spatola




Prestazioni e Movimenti:

Codice	Specifiche	A Lunghezza totale mm	B Lunghezza telaio mm	C Altezza mm	D Diametro mm	E Punta mm	F Stelo mm
AMHD01-LH	Uncino DOWN	413	221	239	Ø 8	8	380
AMHD01S-LH	con leva di blocco	283					250
AMHD01-FH	Uncino DOWN	413					380
AMHD01S-FH	Senza leva di blocco	283					250
AMHU01-LH	Uncino UP	413					380
AMHU01S-LH	con leva di blocco	283					250
AMHU01-FH	Uncino UP	413					380
AMHU01S-FH	senza leva di blocco	283					250
AMHL01-LH	Uncino LEFT	413					380
AMHL01S-LH	con leva di blocco	283					250
AMHL01-FH	Uncino LEFT	413					380
AMHL01S-FH	senza leva di blocco	283					250
AMHR01-LH	Uncino RIGHT	413					380
AMHR01S-LH	con leva di blocco	283					250
AMHR01-FH	Uncino RIGHT	413					380
AMHR01S-FH	senza leva di blocco	283					250
AMT01-LH	SPATOLA	410				5	380
AMT01S-LH	con leva di blocco	280					250
AMT01-FH	SPATOLA	410					380
AMT01S-FH	senza leva di blocco	280					250
5AMHD01-LH	Uncino DOWN	413	221	239	Ø 5	8	380
5AMHD01S-LH	con leva di blocco	333					300
5AMHD01-FH	Uncino DOWN	413					380
5AMHD01S-FH	Senza leva di blocco	333					300
5AMHU01-LH	Uncino UP	413					380
5AMHU01S-LH	con leva di blocco	333					300
5AMHU01-FH	Uncino UP	413					380
5AMHU01S-FH	Senza leva di blocco	333					300
5AMHL01-LH	Uncino LEFT	413					380
5AMHL01S-LH	con leva di blocco	333					300
5AMHL01-FH	Uncino LEFT	413					380
5AMHL01S-FH	senza leva di blocco	333					300
5AMHR01-LH	Uncino RIGHT	413					380
5AMHR01S-LH	con leva di blocco	333					300
5AMHR01-FH	Uncino RIGHT	413					380
5AMHR01S-FH	senza leva di blocco	333					300
5AMT01-LH	SPATOLA	410				5	380
5AMT01S-LH	con leva di blocco	330					300
5AMT01-FH	SPATOLA	410					380
5AMT01S-FH	senza leva di blocco	330					300


Prestazioni	
Angolo di articolazione morso alto/basso	Angolo di articolazione morso destra/sinistra
±80° o più	±80° o più

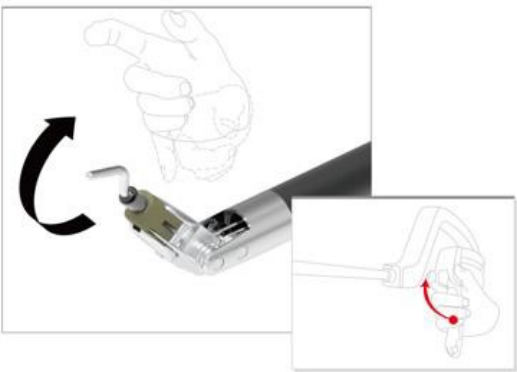


Su

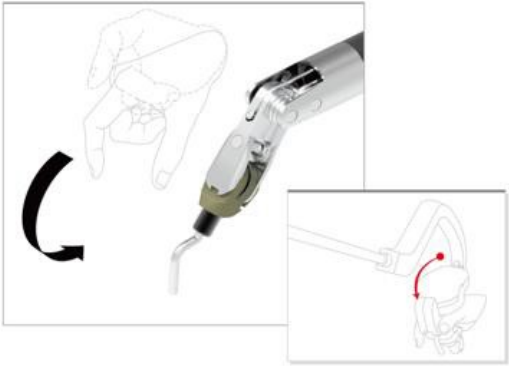

Giù

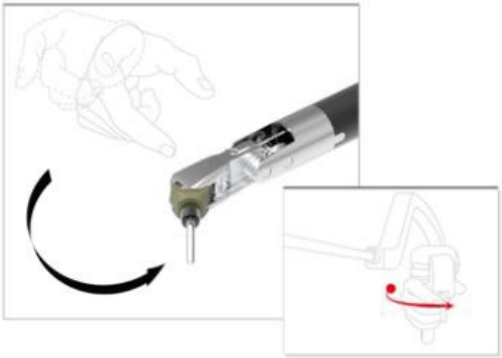

Sinistra

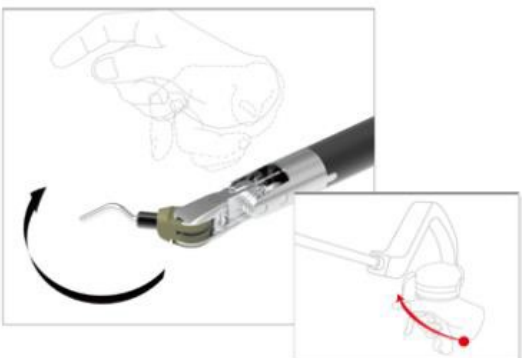

Destra

Tipo di Elettrodo:	Monopolare
Materiali di composizione:	Ceramica/Vetro, Polimeri (Polietilene), Acciaio inox, Zirconio.
Stoccaggio:	Dopo il confezionamento, i prodotti devono essere conservati nelle seguenti condizioni, evitare i gas corrosivi e conservarli in un luogo ben ventilato. Umidità relativa: meno dell'80%, Temperatura: 1°C~50°C
Sterilizzazione:	EO Ossido di Etilene
Durata della Sterilizzazione:	36 mesi
Marchio CE:	Nr. 024-MDR/QS-009/A – Notify Body: 3EC International A.S. - 2265
Compatibilità:	Il prodotto è conforme alle normative vigenti in materia di compatibilità, tossicità e tollerabilità con tessuti e liquidi biologici, ed è privo di lattice e ftalati.
Classe di Appartenenza:	Classe IIb – Reg. UE 2017/745
Istruzioni, avvertenze, controindicazioni ecc.:	Si rimanda alle istruzioni d'uso allegate
Confezione:	Singola-monouso, Box da 1 pz
Confezionamento:	Esterno: cartone Interno: TNT – Polietilene
Produttore:	LivsMed Inc. 304, D-dong, 700, Pangyo-ro, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Repubblica di Corea (Yatap-dong Bundang TechnoPark) Tel: +82 70-4282-7652 Fax: +82 31-706-3211 Sito web: www.livsmed.co.kr e-mail: livsmed.info@gmail.com
Distributore Italia:	Joint Medical Srl Via Filippo Turati, 74 00015 - Monterotondo (RM) Tel. +39 06 39366066 Fax +39 06 25496205 info@jointmedical.it www.jointmedical.it